

Hinweise zu Lagerung und Transport von Flocare® Medizinprodukten

Flocare® Medizinprodukte werden überwiegend steril ausgeliefert. Ausnahme bilden hier einige Zubehörteile, wie bestimmte Konnektoren.

Sterile Produkte sind immer daran zu erkennen, dass die Produktverpackung nahestehendes Symbol trägt. Bei Beschädigung der Primärverpackung (Blisterverpackung) dürfen die Produkte nicht mehr verwendet werden, da u.a. die Sterilität nicht mehr gewährleistet werden kann. Diese Produkte sollten stets entsorgt werden.



Schäden an der Sekundärverpackung, z.B. oberflächliche Beschädigungen wie Schnitte, Kratzer oder eingedrückte Ecken am Außenkarton sind im Normalfall akzeptabel, da diese keinen Einfluss auf die Sterilität und/oder Funktionsweise des Produkts haben. Die Anwendung der Produkte sollte jedoch immer erst nach einer eingehenden Kontrolle erfolgen.

Bei der Lagerung und beim Transport von Flocare® Medizinprodukten, müssen folgende Punkte stets eingehalten werden:

- Die Lagerung erfolgt an einem trockenen Ort.
- Die Produkte werden vor Staub, Regen, direkter Sonneneinstrahlung und Ungeziefer geschützt.
- Die Produkte werden vor einem Zugriff von Dritten (Fremden) geschützt.

Die optimale Lagertemperatur von Flocare® Medizinprodukten beträgt generell 5°- 40°C.

Vor der Anwendung von Flocare® Produkten am Patienten ist die jeweilige Gebrauchsanweisung zu beachten.

Erklärung verwendeter Symbole:



„Trocken aufbewahren“

Das Produkt muss gegen Feuchtigkeit geschützt werden.



„Nicht verwenden, wenn Verpackung beschädigt“

Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn die Primärverpackung beschädigt ist. Ebenfalls darf das Produkt nicht verwendet werden, wenn die Sekundärverpackung eine massive Beschädigung aufweist, sodass wohlmöglich auch die Primärverpackung nicht mehr in einwandfreiem Zustand ist und dadurch die Sterilbarriere nicht aufrechterhalten werden kann.



„Temperaturbegrenzung für Lagerung“

Die Temperaturbegrenzung, der das Produkt sicher ausgesetzt werden kann, muss beachtet werden.



„Produkt ist steril“

Der grüne Punkt gibt an, dass die Produkte in der Verpackung steril sind. Sollte sich der grüne Punkt verfärben, dürfen die Produkte nicht eingesetzt werden, da eine Sterilität nicht mehr gewährleistet werden kann.

Weitere Fragen?
Wenden Sie sich gerne an
medizinprodukte@nutricia.com

Geltungsbereich:

